













91	No.3	tampone faringeo	27 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
92	No.3	tampone faringeo	27 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
93	No.3	tampone faringeo	27 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
94	No.3	tampone nasale	27 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
95	No.3	tampone nasale	27 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
96	No.3	tampone faringeo	27 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
97	No.3	tampone faringeo	27 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
98	No.3	tampone nasale	27 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
99	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
100	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
101	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
102	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
103	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
104	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
105	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
106	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
107	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
108	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
109	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
110	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
111	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
112	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
113	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
114	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
115	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
116	No.3	tampone nasale	29 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
117	No.3	tampone faringeo	29 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
118	No.3	tampone nasale	29 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
119	No.3	tampone nasale	29 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
120	No.3	tampone faringeo	29 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si
121	No.3	tampone nasale	29 luglio 2020	Negativo	Negativo	Si

## 5.2 Risultati dei campioni positivi

Tabella 3 – I risultati dei campioni positivi sono stati testati con Tampone Rapido Test Ag SARS-CoV-2 VivaDiag™ e RT-PCR SARS-CoV-2 e TAC

Campione	Sito clinico	Tipologia di campione	Data del test	Giorni dall'inizio dei sintomi	Ag SARS-CoV-2 VivaDiag™	PCR e TAC	Coincidenza Ag SARS-CoV-2 VivaDiag™
1	No.1	tampone nasale	22 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
2	No.1	tampone nasale	22 luglio 2020	0	Positive	Positive	Yes
3	No.1	tampone nasale	22 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
4	No.1	tampone faringeo	22 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
5	No.1	tampone nasale	22 luglio 2020	4	Negative	Positive	No
6	No.1	tampone nasale	22 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
7	No.1	tampone faringeo	22 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
8	No.1	tampone nasale	22 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
9	No.1	tampone faringeo	22 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
10	No.1	tampone nasale	23 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
11	No.1	tampone faringeo	23 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
12	No.1	tampone nasale	23 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
13	No.1	tampone nasale	24 luglio 2020	3	Positive	Positive	Yes
14	No.1	tampone nasale	24 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
15	No.1	tampone faringeo	24 luglio 2020	5	Negative	Positive	No
16	No.2	tampone faringeo	25 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
17	No.2	tampone nasale	25 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
18	No.2	tampone faringeo	25 luglio 2020	5	Negative	Positive	No
19	No.2	tampone nasale	25 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
20	No.2	tampone nasale	25 luglio 2020	6	Negative	Positive	No
21	No.2	tampone faringeo	26 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
22	No.2	tampone nasale	26 luglio 2020	3	Positive	Positive	Yes

23	No.2	tampone faringeo	26 luglio 2020	5	Negative	Positive	No
24	No.3	tampone faringeo	27 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
25	No.3	tampone nasale	27 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
26	No.3	tampone nasale	27 luglio 2020	6	Negative	Positive	No
27	No.3	tampone nasale	27 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
28	No.3	tampone nasale	27 luglio 2020	3	Positive	Positive	Yes
29	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
30	No.3	tampone nasale	28 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
31	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes
32	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	1	Positive	Positive	Yes
33	No.3	tampone faringeo	28 luglio 2020	3	Positive	Positive	Yes
34	No.3	tampone nasale	29 luglio 2020	0	Positive	Positive	Yes
35	No.3	tampone nasale	29 luglio 2020	2	Positive	Positive	Yes

## 6. Reference

WHO - Instructions and requirements for Emergency Use Listing (EUL) submission: In vitro diagnostics detecting SARS-CoV-2 nucleic acid and rapid diagnostics tests detecting SARS-CoV-2 antigens.